

- Einfache Handhabung
- Stabil
- Idealer Ferienbegleiter
- Einfache Montage mit Spanngurt am Bettrahmen
- Hergestellt in einer Behindertenwerkstatt
- *Manipulation simple*
- *Stable*
- *Idéal pour les vacances*
- *Montage facile par une sangle au cadre de lit*
- *Fabriqué par un Atelier pour personnes handicapées*


STIFTUNG ZENTRUM SIV
Falkenstrasse 28
2502 Biel

FONDATION CENTRE ASI
Rue du Faucon 28
2502 Bienne

Instructions de montage



Accrocher la barre d'aide au lever au levier au cadre du lit

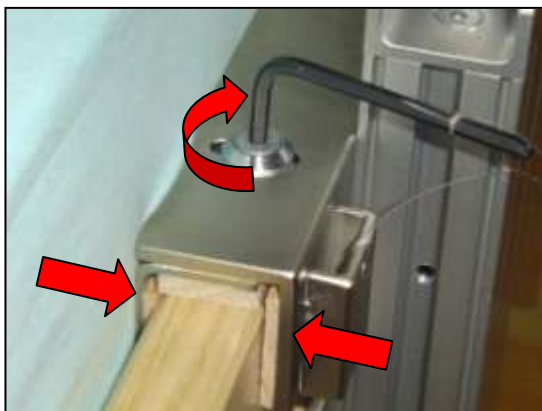

Positionner les deux pièces en forme de „L“ et les fixer au moyen de la clé imbus incluse dans la livraison



Introduire les sangles de sécurité dans les ouvertures prévues à cet effet, autour du cadre de lit, et les fixer solidement



La barre d'aide au lever est prévue uniquement pour l'aide au lever du lit. En aucun cas celle-ci ne doit être utilisée pour entrer ou sortir du lit. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de la procédure d'utilisation.